



Instructiekaart

Verzorging

Wij adviseren om de borstprothese dagelijks schoon te maken. Zorg dat de borstprothese schoon is voor gebruik. Breng de talkpoeder op de prothese aan, dit verlengt de levensduur. Bewaar de borstprothese altijd droog in het meegeleverde EVE tasje.

Onderhoud


De EVE kan het beste schoongemaakt worden met water en zachte zeep (PH-neutraal). Vervolgens droog deppen met een zachte, pluïsvrije doek. De prothese kan tegen alle soorten zeep, maar om allergische huidreacties te voorkomen wordt aangeraden om gebruik te maken van antibacteriële neutrale zeep. Poeder de voorzijde van de prothese af met talkpoeder. Doe dit bij de achterkant om de drie dagen. Gebruik hiervoor een poederkwast, deze laat namelijk geen haren los. Leg de prothese vervolgens met de voorzijde naar beneden in het meegeleverde schaalje in het EVE tasje.

Pasvorm

EVE is een op maat gemaakt product. EVE kan geen verantwoording nemen wanneer uw prothese door verandering van uw lichaam niet meer aansluit. Neem in dat geval contact op met uw EVE Specialist om gezamenlijk te kijken wat er gedaan kan worden.

Indicaties

Het dragen van een EVE borstprothese is een esthetische hulpmiddel. Echter kan de EVE door haar zeer nauwkeurige pasvorm, in samenwerking met de BH, de juiste tegendruk geven en kan daardoor een verlichtende werking hebben op de oedeemvorming. Je kunt je onbelemmerd bewegen en er zelfs mee zwemmen en sporten.

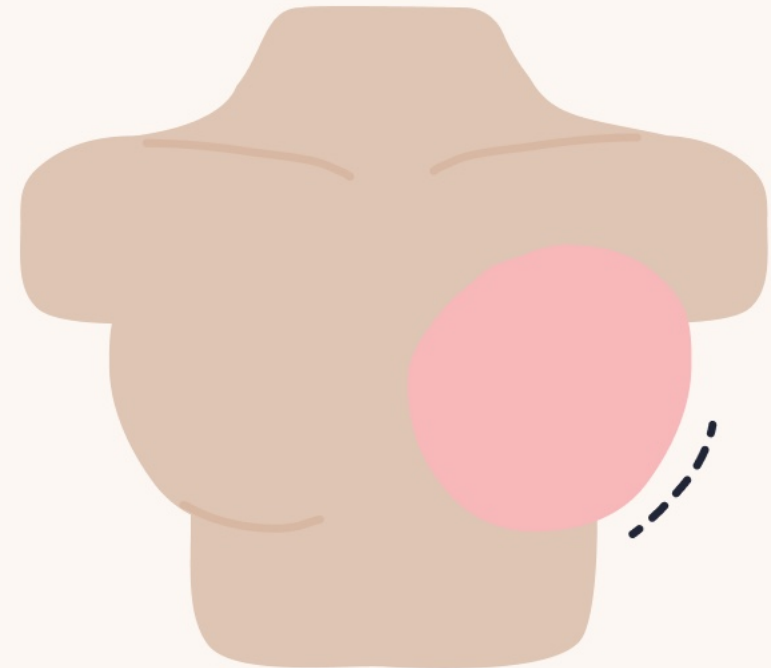

Gemaakt van 100%
siliconenmateriaal.

